



Save • Someone's life



Defi[®] 5S +

Προηγμένος αυτοματoποιημένος εξωτερικός απινιδωτής

Defi[®] 5S +

Προηγμένος αυτοματοποιημένος
εξωτερικός απινιδωτής

ONE BUTTON FOR HEART..



Εκκίνηση συσκευής 1

Ανοίξτε τη συσκευή.
Ξεκινά αμέσως η φωνητική καθοδήγηση για τον τρόπο λειτουργίας του AED.



Τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια στο θώρακα του ασθενή 2

Μετά την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων,
το AED θα αρχίσει αμέσως να αναλύει το ηλεκτροκαρδιογράφημα.
Η συσκευή θα προχωρήσει στο επόμενο
βήμα μόνο αφού έχετε τοποθετήσει καλά τα ηλεκτρόδια.



Επιλέξτε ένταση 3

Η διεθνής οδηγία για την ανάληψη συνιστά να μειωθεί η ενέργεια
για τον ασθενή-παιδί ώστε να αποφευχθεί η καύση του καρδιακού μυός.
Η σειρά Meditech Defi 5S μπορεί να μειώσει την ενέργεια σε 30/70J
απλά επιλέγοντας το συγκεκριμένο εύρος ενέργειας.



Πιέστε το κουμπί 4

Εάν απαιτείται απινίδωση,
Πατήστε το κουμπί για να κάνετε απινίδωση στον ασθενή.

WHY

Πλεονεκτήματα



1 **Ενδείξεις LED**
Εγχειριμ. ενδείξεις LED για κάθε βήμα



2 **Επιλογή ενέργειας**
Διαθέσιμο ενεργειακό εύρος 50 J έως 200J ανάλογα με την ηλικία και την κατάσταση



3 **Μεγάφωνο**
Ο σχεδιασμός ηχείου υψηλής ποιότητας παρέχει εξαιρετικό και δυνατό ήχο, καθιστώντας το εύκολο να ακούσετε τις οδηγίες της συσκευής σε δημόσιο χώρο



4 **Γραμμική καθοδήγησης**
Οπτικά βήματα για τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή



5 **Γραπτές οδηγίες**
Γραπτές οδηγίες πάνω στη συσκευή για κάθε βήμα και για κάθε κουμπί διαγραφής πληροφοριών



6 **Κουμπιά**
Μαλακά και αδιάβροχα κουμπιά



2 Languages
Selectable



Λειτουργία Παιδιού
50/50/75 Joules



Λειτουργία Ενήλικα
150/150/200 Joules



Infra-Red
Data transfer



Self test
Day, Week, Month



Sound volume
5 Levels



Carry Case
for AED and first Aid



Built-in Memory
ECG waveform



Biphasic function

- 2 Γλώσσες Επιλογής
- Κουμπί Λειτουργίας για Ενήλικες / Παιδιά
- Ημερήσιος, Εβδομαδιαίος και Μηνιαίος Αυτοέλεγχος (Self-test)
- Το AED μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ βρίσκεται στη τσάντα
- 5 Επίπεδα έντασης ήχου
- Ασύρματη μεταφορά δεδομένων

Τεχνικές προδιαγραφές

Αυτοέλεγχος
Λειτουργία
Κυματομορφή
Ενέργεια
Συχνότητα ενέργειας

Ημερήσιος, Εβδομαδιαίος, Μηνιαίος
Ενηλικιω/Παιδιών
Διακριτική Με διακοπές Αυξανόμενη
200-Joules max.
Λειτουργία Παιδιού:
50/50/75 Joules
Λειτουργία Ενήλικα:
150/150/200 Joules
Λιγότερο από 6 sec. στα 150J
Λιγότερο από 8 sec. στα 200J
Εκτεταμένη φωνητική προτροπή
Οδηγίες LED
Τρία κομμάτια:
ON/OFF, Επιλέξτε λειτουργία, Shock
1,500 περιστάτικά. (4 ώρες)
Υπεριώδης
Μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία
12V, 2800mAh Li-MnO2 Cell

Χρόνος φόρτισης
(Νέα, στους 25°C)
Φωνητική προτροπή
Έλεγχος οπτικών ενδείξεων
Έλεγχος

Αποθήκευση ΗΚΓ (ECG)
Μεταφορά δεδομένων
Ισχύς
Τύπος

Θερμοκρασία λειτουργίας
Λειτουργία σε υγρασία


0°C έως 40°C
Σχετική υγρασία ανάμεσα σε 30%
και 95% (χωρίς πύκνωση)
-20°C έως 55°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης
(Χωρίς μπαταρία)
Υγρασία αποθήκευσης
(Χωρίς μπαταρία)
Θερμοκρασία αποθήκευσης
(για τα ηλεκτρόδια)

Εύς 93% (χωρίς πύκνωση) Σωματική
0 -50°C

Διαστάσεις

Βάθος (D) : 80mm
Πλάτος (W) : 240mm
Μήκος (L) : 300mm
1.9Kg (4.2 Pounds)

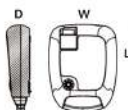

Βάρους/με μπαταρία)

Εξαρτήματα

■ Μπαταρία

CR123A - 4x2 2.8Ah 12Volt
μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία

■ Ηλεκτρόδια μιας χρήσης



Σχεδιασμένο για χρήση εξωτερικής απινίδωσης,
μη επεμβατικής βηματοδότησης, συγχρονισμένης
καρδιοανατάξης και παρακολούθησης σε ενήλικες
και παιδιά με βάρος άνω των 20 kg (55 lbs).



■ Θήκη μεταφοράς

- 1 Αντανακλαστικό
- 2 Μαλακό χέρι
- 3 Προστασία ηχείου
- 4 Διαφανές οθόνη
- 5 Προστατευτικό πρίζας





MEDITECH[®]
EQ

Advanced Medical Technology



Meditech Equipment Co.,Ltd (Meditech Group)
Address: 140 Zhuzhou Rd, Qingdao , Shandong Province, P. R. C
Tel: (+86) 532 85832673
Fax: (+86) 532 81705331
Email: sales@meditech.cn
www.meditech.com.cn

CE 0482